

## 一般医療機器(口腔嚥下機能訓練器具)

器58整形用機械器具  
理学療法用器械器具  
一般医療機器 口腔・嚥下機能訓練器具  
(JMDNコード: 63278001)



一般医療機器クラスI
製造販売届出番号 30B3X10004000001
製造販売業許可番号 30B3X10004
意匠登録済 意匠番号 第1579721号
特許取得済 特許証番号 第6333487号

人間が持つ2つの本能を活用して生まれたのが「タン練くん」です。

赤ちゃんがミルクを飲む

飲み込む時、舌が必ず上あごにつく

### 形状・構造及び原理等

#### 〈形状・構造等〉

本品は口腔嚥下機能の訓練のためにニップル(吸い口)とボトル、キャップ、グリップキャップからなる。

#### ●形状



#### ●材質・組成

ニップル部……シリコン、ベース材、白金触媒、架橋材、硬化遅延材

ボトル部……ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート樹脂

グリップキャップ部……ポリプロピレン樹脂

キャップ部……ポリプロピレン樹脂

### 使用目的又は効果

口腔や嚥下の機能低下に対し、使用するリハビリテーションを行う理学療法用器具。

### 使用方法等

飲料を入れて、吸い口をくわえて舌を動かし飲むことで舌、口腔周囲筋、嚥下関連筋の筋力をつける。

### 使用上の注意

#### 〈重要な基本的注意〉

●上を向いて飲まないこと。内容量が減ってきた場合、ボトルの底を上げて飲むこと。

●トロミを付ける場合は、ボトル内で流れる程度にし、トロミ用ニップル(別売)のトロミのねばりに合わせて、1mm、2mm、3mmのニップル丸穴のものを使用すること。

※通常品のニップル孔は1.5mmのクロスカットです。

●ALS、パーキンソン病、脳梗塞等のまひのひどい方

は十分に見守りの上、使用すること。

●組立時、ニップルを十分に引き上げ、定位置にはめ込むこと。

●破折等による誤飲のおそれがあるので、以下は行わないこと。

①本製品(本体ボトル、グリップキャップ)に対する曲げ・切削・加圧等

②粗雑な扱い(キズをつける・落下させる・強い衝撃を与える等)

●薬液等が付着した場合、腐食するおそれがあるので速やかに清拭すること。

### 保管方法及び有効期間等

#### 〈保管の条件〉

高温、多湿、直射日光、凍結及び水濡れを避けて保管すること。

### 保守・点検に係る事項

●ニップルは消耗品のため、破損や傷みが見られた場合はすぐに使用を中止し、新製品へ交換すること。

●ニップル部分の穴について、綿棒などでの清掃をすると裂けるので穴の大きさについては製品購入時より広がっていないか確認・点検する。

●漂白剤や水銀の重塩化物などの強酸(pH4以下)又はアルカリ(pH10以上)製剤を消毒に使用しないこと。

●金属ブラシ(スチールウール、ワイヤーブラシ、パイプクリーナー等)や硬質ナイロンスポンジ、研磨剤入り洗剤を使わないこと。

●洗浄は分解して行うこと。

●食洗機は使用しないこと。

### 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

#### 〈製造販売業者〉

株式会社 リハートテック TEL.073-460-9805

#### 〈製造業者〉

株式会社 桜山製作所 TEL.029-266-1777

### 本製品についてのお問い合わせ先

株式会社リハートテック

〒649-6264 和歌山県和歌山市新庄 490

TEL.073-460-9805 受付時間 / 9:00~16:00(土日祝を除く)


<https://rehearttek.com/>

## ご使用にあたって


- 内容量が少なくなった場合に、極端に顔を上に向けながら飲まないでください。誤嚥につながるおそれがあり、たいへん危険です。

内容量が少なくなったら

○ ニップルの位置はそのままでも、ボトルのみを持ち上げて飲む。

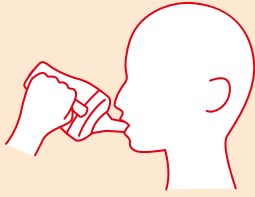

ニップルは柔らかい素材ですので、くわえながら吸う位置を調整できます。

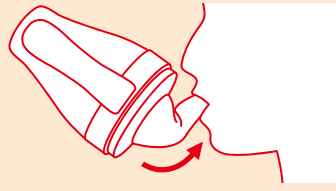

✕ 上を向きすぎる。⚠ 誤嚥のおそれがあります!



- 本品は窒息事故(餅やその他の食品による)を防止できるものではありません。
- 分解して洗った後、矢印を合わせてから組み立て、ニップルの「上」という文字が書いてある方を上にしてお飲みください。
- お手入れの時は食器用洗剤、つけ置き用洗剤、または哺乳瓶用のものをご使用ください。誤嚥が進み、トロミなどをつけている方はニップルのみ外して、舌を動かし、飲む動作をするだけでも強い運動になります。
- 小容量タイプは1回の運動量としてちょうどよい容量になっております。大容量タイプでは大変痩せている方が、大人用粉ミルクを入れて、栄養補給をしていただきやすい大きさにしております。
- 普段から吐き戻して窒息が起こりやすい状態の時はご使用を控えてください。
- 先端の吸穴や空気弁が張り付いていると、吸っても出なくなることがありますので、お手入れを欠かさないようにしてください。
- ニップル(乳首)は消耗品です。
- ご使用中に使用者様がむせた場合はご使用を中止するか、落ち着くのを待ってから続けてください。
- 内容物が減ってきましたら、顔は正面を向いた状態で、ボトルの底を持ち上げてください。飲み込んだ後にのどの動きを数秒止めると効果が高まります。
- 効果には個人差があります。
- 本品は嚥下カトレーニングボトルです。水分や栄養摂取などに長くお使い頂くと、嚥下力のさらなる向上につながります。

## このような方には見守りが必要です

- 起こして飲ましてあげる必要がある、寝たきりの方
- 食事がほとんどできなくなっている方
- トロミを付けたものや、ミキサー食などの流動食を召し上がっている方
- 飲み込みの筋肉にマヒのある方
- 終末期、パーキンソン病、ALSの方は十分にご注意のうえ、使用してください。
- かなり誤嚥が進んで飲み込む力が弱まっている方は、ボトルに何も入れずにニップルをくわえてトレーニングをするところから始めてください。

## 吸い口の取り付け方



1 吸い口をグリップキャップの下から差し込みます。



2 吸い口とグリップキャップの矢印の位置を合わせ、矢印下の線がグリップキャップの穴から全て出て外れなくなるまで、上方向に引っ張りあげます。

反対側に「上」と書いています。そこを上にして飲んでください。



拡大

## 誤った取り付け方の例



矢印の位置があっていない。



吸い口がグリップキャップにしっかりとハマっていない。